



Mund- und Atemmaske Produktbroschüre

”

Gemeinsam erreichen
wir am meisten!

“

Wir tragen die Verantwortung für unsere Zukunft.



Deswegen liegt die Gesundheit unserer Mitmenschen uns am Herzen. Uns gegenseitig zu schützen und zu unterstützen hat oberste Priorität.


Wir möchten mit Spaß und Neugier zu einer Welt beitragen, in der Technik Menschen begeistert. Durch den Einsatz von High-End Technologie, unserer elektronischen und mechanischen Kompetenzen, meistern wir jede noch so anspruchsvolle Aufgabe. Dabei bauen wir auf einem Grundgerüst von Verantwortung, Wertschätzung und Vertrauen.



100 % Eigenproduktion
am Standort Deutschland



Kontinuierliche
Qualität

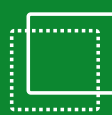

Transparenz



Maximale
Umweltverträglichkeit



Linner Elektronik GmbH

Ingolstädter Straße 24
85283 Wolnzach
www.linner.com

Bestellung an

krisenprodukte@linner-elektronik.de

Ansprechpartner

Martin Schupp | Vertriebsinnendienst

tel. +49 (0) 8442 2696 | mail: martin.schupp@linner-elektronik.de

Florian Guggenberger | Vertriebsaußendienst

mob. +49 (0) 151 264 644 55 | mail: florian.guggenberger@linner-elektronik.de

Produktinformation

Mund- und Atemmaske 80002

4-farbig bedruckbar



Artikelnummer: 80002
Verpackungseinheit: 100 Stück im Karton
Besonderheit: 4-farbig bedruckbar



- Hohe Filterleistung durch Baumwoll-Polyester-Mischfaser
- dicht anliegend
- angenehmer Trage- und Atmungskomfort
- bis zu 25 x aufbereitbar bei 90 °C
- chemothermische sowie thermische Wäschedesinfektion nach RKI / VAH möglich



Einsatzbereich



- Gebäudereinigung
- öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise Schulen, Einzelhandel
- zur Vermeidung von Kontaminierung mit pathogenen Keimen in gewerblichen Bereichen, bei den Dienstleistern und in öffentlichen Einrichtungen
- in den privaten Bereichen, z.B. bei Renovierungs- oder Reinigungsarbeiten
- bei der Krankenpflege zu Hause uvm.

Technische Hinweise

Flormaterial: 45 % Polyester / 55 % Baumwolle
Bänder: 100 % Polyester
Herstellung: Deutschland
Abmessung: 28 x 10,5 cm
Gewicht: 25 g


Besondere Hinweise: Kein Medizinisches Produkt · Noch keine Zertifizierung und nicht medizinisch geprüft · LINNER übernimmt keine Produkthaftung

Alle Angaben in diesem Dokument wurden gemäß unseren Spezifikation und nach besten Wissen erstellt. Diese Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne Angabe von Gründen geändert werden. Unsere Kunden sind für den bestimmungsgemäßen Einsatz der Produkte verantwortlich. Insbesondere wird der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, alle gesundheits-, sicherheits- und umweltrelevanten Eigenschaften der gelieferten Produkte in deren speziellen Einsatzbereichen zu überprüfen.

Mund- und Atemmaske 80002

Anleitung

01. Maske auspacken
02. Oberseite der Maske mittels Daumen und Zeigefinger auf dem Nasenrücken andrücken / fixieren.
03. Maske mit den oberen Bändern am Hinterkopf über den Ohren fixieren.
04. Bänderung der Unterseite der Maske mit Schleife im Nacken fixieren.
05. Dichtigkeit und Passgenauigkeit der Maske überprüfen. Bei festem Ausatmen darf kein Luftzug an den Seiten der Maske auftreten.

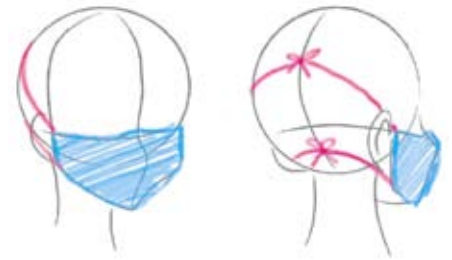

Waschanleitung

- (Bei normaler Wäsche 60 °C)
- Bei normaler Wäsche max. 90 °C
- Keinen Weichspüler
- Kein Chlormittel, nicht bleichen
- Trommeltrockner nicht über 90 °C
- Bei geringer bis normaler Temperatur bügeln

**Schützen Sie sich und
Ihre Mitmenschen.**



Produktinformation

Mund- und Atemmaske 80003

4-farbig bedruckbar



Artikelnummer: 80003
Verpackungseinheit: 500 Stück im Karton



- Community-Maske verringert für andere Menschen das Risiko einer Tröpfchen-Infektion bei Husten, Niesen oder Sprechen
- dicht anliegend für jede Kopfform
- angenehmer Trage- und Atmungskomfort
- bis zu 25 x aufbereitbar bei 90 °C
- chemothermische und thermische Wäschedesinfektion nach RKI / VAH möglich



Einsatzbereich



- Gebäudereinigung
- öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise Schulen, Einzelhandel
- zur Vermeidung von Kontaminierung mit pathogenen Keimen in gewerblichen Bereichen, bei den Dienstleistern und in öffentlichen Einrichtungen
- in den privaten Bereichen, z.B. bei Renovierungs- oder Reinigungsarbeiten
- bei der Krankenpflege zu Hause uvm.

Technische Hinweise

Maskenmaterial: 100 % Polyester
Eifaßband: 100 % Polyester
Herstellung: Deutschland
Abmessung: Oval 15 x 18 cm
Gewicht: 9 g


Besondere Hinweise: Kein Medizinisches Produkt · Noch keine Zertifizierung und nicht medizinisch geprüft · LINNER übernimmt keine Produkthaftung

Alle Angaben in diesem Dokument wurden gemäß unseren Spezifikation und nach besten Wissen erstellt. Diese Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne Angabe von Gründen geändert werden. Unsere Kunden sind für den bestimmungsgemäßen Einsatz der Produkte verantwortlich. Insbesondere wird der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, alle gesundheits-, sicherheits- und umweltrelevanten Eigenschaften der gelieferten Produkte in deren speziellen Einsatzbereichen zu überprüfen.

Mund- und Atemmaske 80003

Anleitung

00. Maske auspacken.
01. Maske an den Seiten mit der Bänderung festhalten und zum Gesicht führen. Dabei die Maske über Nase und Mund legen.
02. Die Bänderung an der Gesichtsseite über die Ohren legen. Bänderung am Hinterkopf mit einem Knoten befestigen. Ggfs. überstehende Bänderung abschneiden. Dafür die Maske absetzen.
03. Maske über den Kopf anziehen .
04. Maske über Nase und Mund legen.
05. Maske kann für vorübergehendes Ablegen unter das Kinn gezogen werden.
VORTEIL: Keine Ablage auf evtl. kontaminierte Flächen notwendig!

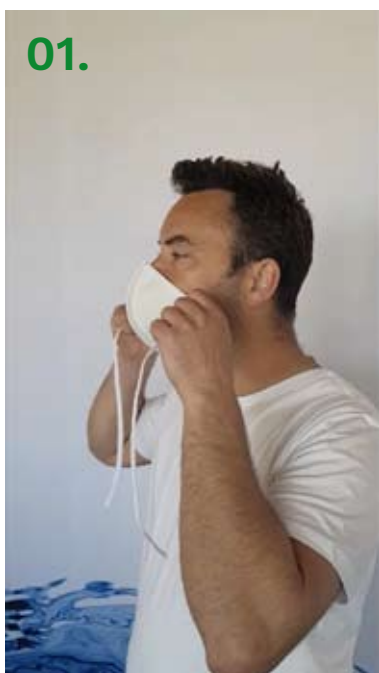

Waschanleitung

- (Bei normaler Wäsche 60 °C)
- Bei normaler Wäsche max. 90 °C
- Keinen Weichspüler
- Kein Chlormittel, nicht bleichen
- Trommeltrockner nicht über 90 °C
- Bei geringer bis normaler Temperatur bügeln



Kinder sind unsere Zukunft ...

... deswegen sind sie auch Teil unserer sozialen Verantwortung. Wir produzieren auch Mund- und Atemmasken für die Kleinen unter uns. Bei Interesse setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung!

Übersicht Desinfektionsmittel



Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Gebindeinhalt	Gebindeart	VPE	Palette*
04011090	Hände-Desinfektionsmittel	140 ml	Minitrigger mit Schraubverschluss	45	1.800
04011410	Hände-Desinfektionsmittel	250 ml	PET-Flasche	6	1.152
04013000	Hände-Desinfektionsmittel	1000 ml	PET-Flasche	6	360
04015000	Hände-Desinfektionsmittel	5 L	PE-Kanister	1	96
4016000	Hände-Desinfektionsmittel	10 L	PE-Kanister	1	60
04017050	Hände-Desinfektionsmittel	25 L	PE-Kanister	1	12
04019000	Hände-Desinfektionsmittel	200 L	Kunststoff-Fass	1	2

* Abnahme nur von sortenreinen Paletteneinheiten

Alle o.s. Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen

Hygiene & Desinfektionsstation Desistation „DFN01“



- inkl. Desinfektionsspender (1.000 ml)
- stabile Stahlausführung
- Antimikrobielle Beschichtung
- hygienische Handdesinfektions-Anleitung gem. CEN EN 1500 (20 x 30 cm)
- rückseitige Befestigung für Flächendesinfektion z.B. Sprühflaschen & Reinigungstücher
- rutsch- & kratzfeste Bodenplatte
- Made in Germany
- Maße: 160 x 25 x 12 cm (h x b x t) Fußteil: d 50 cm
- Gewicht: 20 kg
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)





Praktisch & immer erreichbar ...

... ist die Desistation DFN01 als zentrale Anlaufstelle für Desinfektionsmittel. Die stabile Station für saubere Hände.



Hygieneschutzwand mobil

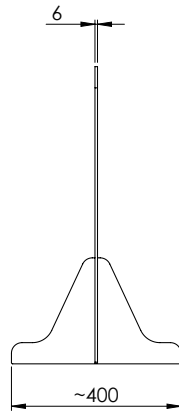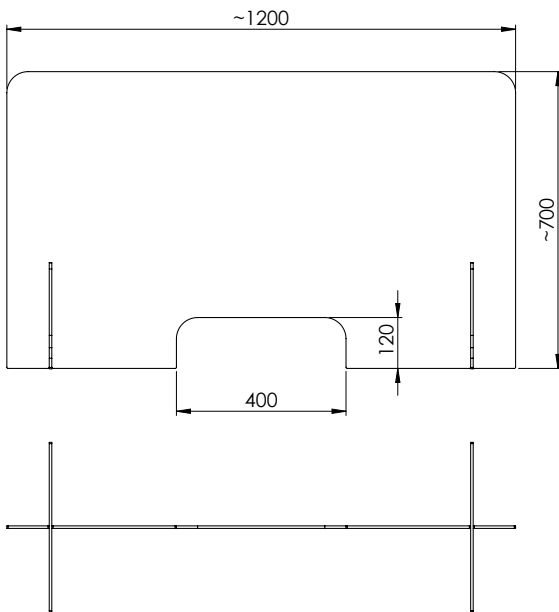

- 6 mm Acrylglas farblos
- einfach aufzustellen
- Fußteil steckbar (werkzeuglos)

